

HI-FLO



Hi-Flo ist ein wiederverwendbarer Zerstäuber mit hohem Wirkungsgrad, der mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Kompressoren und mit zentralisierten Druckluft-Krankenhaussystemen kompatibel ist. Hi-Flo ist mit jeder Art von Medikamenten wirksam. Hi-FLO ist dank des "zweiten Venturi-Effekts", sehr schnell. Durch die seitliche Öffnung wird zusätzliche Luft von außen in den Zerstäuber befördert, dadurch wird die Zerstäubungsaktivität und der daraus resultierende Fluss zum Patienten zu erhöht. Das Restvolumen wird dank des speziellen Materials, das in den Innenwänden des Zerstäubers verwendet wird, auf ein Minimum reduziert, dadurch gleiten die Partikel nach unten und können somit erneut vernebelt werden. Hi-FLO kann durch Kochen sterilisiert werden.

HI-FLO - Granulometrieanalyse nach EN 13544-1

Operating Flow (l/min)	Fill Volume (ml)	MMAD(μ m) Mass Median Aerodynamic Diameter	GSD Geometric Standard Deviation
4.0	2.5ml 2,5% NaF	4.25	2.67
5.0	2.5ml 2,5% NaF	2.44	2.87
5.2	2.5ml 2,5% NaF	3.25	3.45

HI-FLO - Analyse des Sprühnebels nach EN 13544-1

Operating Flow (l/min)	Fill Volume (ml)	Output (μ l)	Output Rate (μ l/min)
4.0	2.5ml 2,5% NaF	313	128
5.0	2.5ml 2,5% NaF	304.7	56.7
5.2	2.5ml 2,5% NaF	257	51.0

PHARMACODE

4046648 _____ HI-FLO in der Box:
HI FLO Vernebler, Maske für Erwachsene, Maske für Kinder, Mundstück, Nasengabel, Luftschlauch

EAN CODE


8 054619 104637

Verteiler:

ELK Pharma Sagl - Via G. Guisan 6 - CH-6830 Chiasso
Tel. +41 91 682 80 22 - Fax +41 91 682 16 55 - info@elkpharma.ch

CE 0123

ELKPharma